


Шарм по телу



«CHARM»-body (Шарм-1Т)

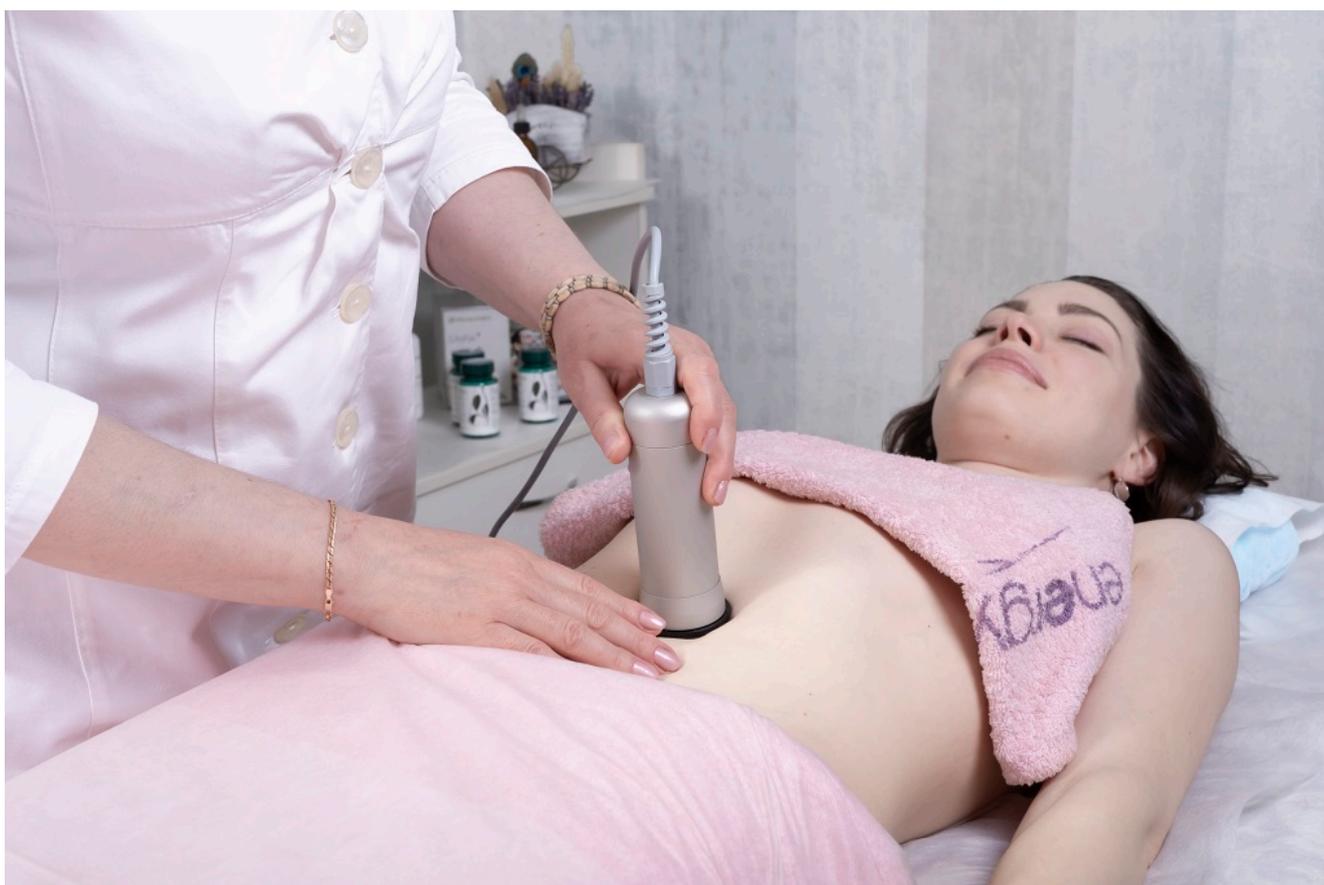

Профессиональный аппарат «CHARM»-body («Шарм-1Т») является высокоэффективным многофункциональным косметологическим оборудованием, и предназначен для проведения процедур механической дермотонии тела.

Рабочими органами аппарата служат две концентричные многоэлементные насадки с эбонитовыми пальчиками, выполняющие возвратно-вращательные движения вокруг продольной оси электромеханического модуля во встречных направлениях с регулируемой частотой и амплитудой. Для удобства работы мастера, модуль оборудован дополнительными кнопками управления.

Механическая дермотония тела – это комплексная процедура, включающая в себя лимфодренаж и, собственно, механическую дермотонию кожи и мышц.

Лимфодренаж – основа для внутренних очистительных процедур и глубокой очистки тканей от продуктов жизнедеятельности клеток. Он одновременно обеспечивает более равномерное распределение жидкости или частичное ее удаление из организма, преобразуя контуры тела, разглаживая проблемные зоны.

Механическая дермотония – прямое механическое воздействие на разные слои кожи и мышцы:

- На эпидермис и дерму – улучшается микроциркуляция, достигается дефиброзирующий эффект, повышается упругость и эластичность;
- На подкожно-жировую клетчатку – активизируется процесс обмена веществ, липолиза, сжигания жира;
- На мышечный корсет – повышается тонус и работоспособность мышц, снимаются мышечные спазмы.

Массаж вызывает раздражение механорецепторов и терморепцепторов кожи, оказывает стимулирующее воздействие на нейрогуморальную систему.

Немаловажным фактором в механической дермотонии является воздействие на рефлекторные зоны, в результате чего устраняются нейро-вегетативные нарушения: головная боль, тревога, чувство сдавления груди, улучшается работа желудочно-кишечного тракта. Активизируются венозная и лимфатическая циркуляция, расширяются артериолы, улучшается питание тканей, выводятся шлаки и токсины.

Принцип действия модуля прибора: возвратовращательные движения пальчиковых насадок, позволяющих проводить классический лимфодренажный массаж передней и задней поверхности тела по ходу лимфатических сосудов, помпаж групп лимфатических узлов. Это позволяет эвакуировать застойную жидкость, содержащую продукты обмена веществ, токсины, «шлаки». Более глубокие ткани мышцы и жировую ткань, прорабатываются на более низких частотах, что активизирует обменные процессы, липолиз, способствует тонизации мышц.

Наиболее актуальные проблемные зоны тела, корректируемые аппаратом «Шарм–1Т»:

1. Первая и основная зона это живот. У многих девушек и женщин нормальное телосложение, без лишних килограммов, а вот живот толстый, обвислый, по бокам торчат «ушки» и имеется целлюлит. Эта проблема охватывает не только полных людей, но так же и худеньких, причём в любом возрасте. Если в области кожи живота присутствуют целлюлит, то во время процедуры можно использовать специальные крема для массажа.

Аппаратом «Шарм–1Т» массаж в области зоны живота мы работаем по часовой стрелке (по ходу кишечника). Такой массаж способствует запуску перистальтики кишечника, что очень часто является очень актуальным моментом, предупреждающим повторное возникновение проблем с областью живота.

2. «Двойной» подбородок . Двойной подбородок довольно часто появляется у женщин, склонных к полноте, уже к тридцати годам. Это значительно портит внешний вид и прибавляет несколько лет к реальному возрасту женщины. Прорабатывая зону двойного подбородка аппаратом «Шарм–1Т», мы получаем отличный результат. Это объясняется приведением к балансу мышц в зоне подбородка, улучшением кровообращения, приданием тонуса тканям, страдающим от излишков жидкости и жира, способствующих птозу.

3. Коррекция воротниковой зоны – «холка». «Холкой» в народе именуют локализацию жира в районе позвонка С7, которая мешает правильной осанке, выглядывает из под одежды, и очень сильно портит внешний вид, да к тому же старит женщин. Самое главное в холке – это пагубный эффект для здоровья. Солевые отложения давят на сосуды, расположенные внутри шеи и ведущие в головной мозг.

Ярко выраженный результат по ликвидации этого дефекта мы получаем с помощью аппарата «Шарм–1Т». Массируя данную область, мы постепенно уменьшаем уплотнение и возвышение

тканей, шаг за шагом исчезает и «холка». Помимо этого происходит расслабление плечевого пояса, проходят боли, спазмы, улучшается осанка.

С 40–45 лет у женщин начинается период ранней предменопаузы. В это время начинаются изменения в подкожной жировой клетчатке: формируется рыхлость, фиброзирование – деструктуризация ткани. Возникает необходимость перераспределения тканей. Шарм–1Т – по телу прекрасно справляется с этой задачей, формирует стройное тело, при этом возвращая своим хозяйкам утраченную талию, округлость бедер и красоту предплечий.

При помощи аппарата Шарм 1Т можно так же массировать подошвы ног. На подошвах располагаются более 60 биологически активных зон, имеющих непосредственную связь с внутренними органами. Через них проходят важные каналы. Это мощная рефлексогенная зона. Воздействие на рефлекторные зоны устраняет нейро-вегетативные нарушения: головные боли, тревогу, чувство сдавления груди, также улучшается работа желудочно-кишечного тракта. Активизируются венозная и лимфатическая циркуляция, расширяются артериолы, улучшается питание тканей, выводятся шлаки и токсины. Массаж стоп аппаратом Шарм -1Т очень приятен и обладает мощным расслабляющим эффектом, но он также снимает усталость, улучшает сон, активизирует иммунную систему, воздействуя на весь организм в целом. При помощи массажа аппаратом «Шарм–1Т», косметолог проводит профилактику формирования выступающего медиально сустава – «косточки» большого пальца стопы.

Массаж аппаратом «Шарм–1Т» рекомендуется проводить , **когда необходимо получить следующие эффекты:**

- Коррекция и моделирование фигуры;
- Проведение антицеллюлитных программ;
- Снижения веса и устранения локальных жировых отложений;
- Улучшения тургора кожи, упругости мышц;
- Восстановления фигуры после родов;
- Снятие мышечного спазма и болевого синдрома;

- Реабилитации после травм;
- Детоксикации организма;
- Антистрессовые программы.

Противопоказания:

- Нарушение мозгового кровообращения
- Тяжелые черепно-мозговые травмы
- Наркологическая зависимость
- Онкология
- высокое артериальное давление
- диабет
- высокая температура тела (более 38*)
- ожоги
- переломы
- открытые раны
- кожные заболевания
- в послеоперационный период
- любое инфекционное заболевание
- эпилепсия
- астма
- заболевания сердца
- беременность
- Психические расстройства и некоторые неврологические заболевания

Основные преимущества аппарата «CHARM»-body («Шарм-1Т»):

- Отсутствие вакуумного воздействия;
- Безопасность и универсальность;
- Комфортность и безболезненность процедуры;
- Видимые результаты с первой процедуры с нарастающим эффектом в течение курса;
- Возможность работы по активным препаратам

Массаж аппаратом Шарм-1Т проводится курсом от 7 до 15 процедур один-два раза в неделю.